


Instruções de Uso - Manual do Paciente

PORD™ Dispositivo de Redução Posterior

Descrição

O PORD™ Dispositivo de Redução Posterior é um dispositivo para ser acoplado a uma mesa de cirurgia de fratura padrão e colocada como apoio por baixo do quadril ou do fêmur do paciente. Possui uma barra que se prende à estrutura da mesa.

Para poder ser levantado e abaixado, o Suporte de Membro tem uma Borda Radiolúcida e uma porca e um Parafuso de Aperto integral. O projeto do equipamento capacita o local da fratura para ser suportado sem obstrução para o braço-C do Intensificador de Imagem. O dispositivo PORD™ é compatível com a maioria das mesas padrões de fraturas.

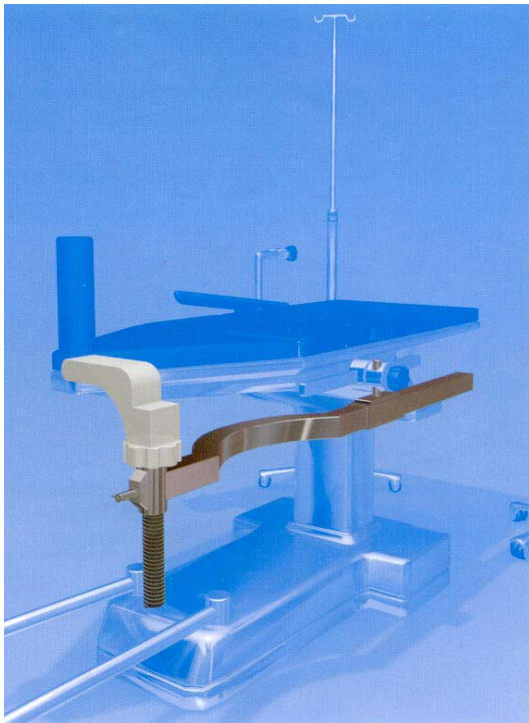


Finalidade

O PORD™ Dispositivo de Redução Posterior foi projetado para apoiar o membro fraturado mantendo-o posicionado para corrigir inclinação posterior da fratura e para manter a redução durante a fixação.

O PORD™ Dispositivo de Redução Posterior , código 110000 é formado pelos seguintes componentes:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - 1 Barra Horizontal | cód. 111000 |
| - 1 Abraçadeira Caixa de Suporte | cód. 112000 |
| - 1 Suporte de Membro | cód. 113000 |
| - 1 Porca | cód. 114000 |

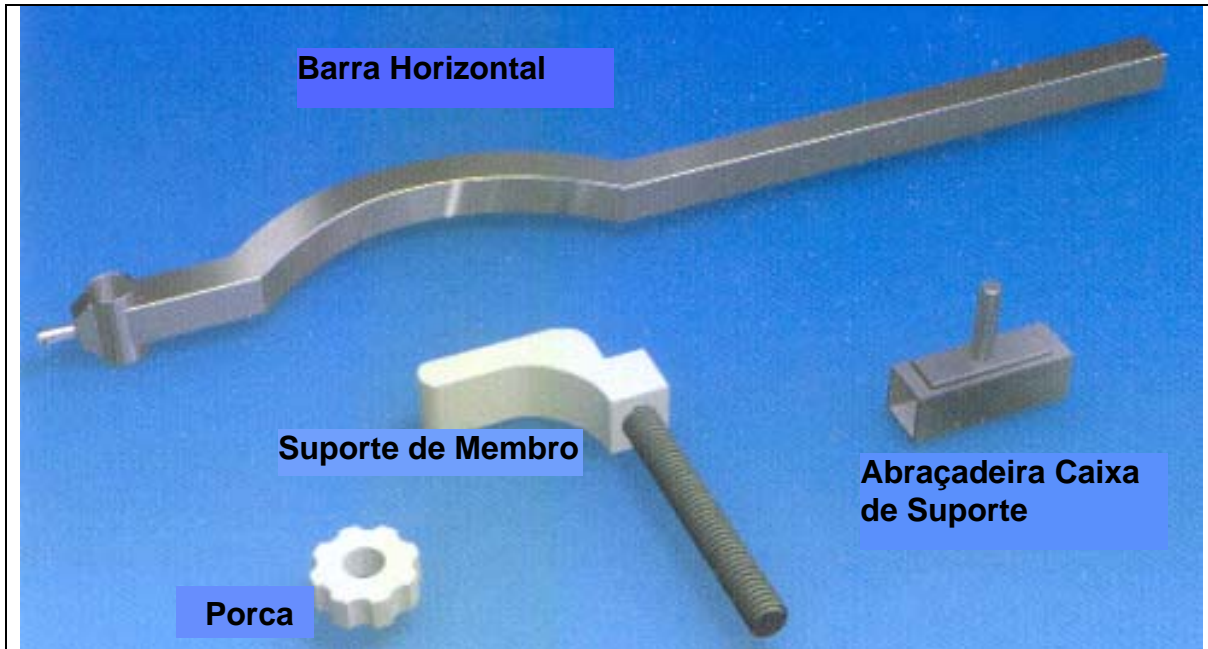

Embalagem


Os componentes do PORD™ Dispositivo de Redução Posterior são embalados individualmente em invólucros de polietileno e acomodados em caixa de embarque.

Precauções


1. Examinar os componentes do PORD Dispositivo de Redução Posterior cuidadosamente antes de usá-lo para certificar-se das condições adequadas de funcionamento.
2. Não aplicar muita pressão ao apertar a porca para não danificar a rosca.

Instruções de Uso


1. Posicionar o paciente na mesa de fratura. Deslizar o adaptador Clark sobre o lado do trilho na mesa de fratura. Inserir o pino vertical da caixa de suporte no adaptador Clark para baixo e apertar o grampo no pino de tal forma que o suporte angulado seja preso com segurança.

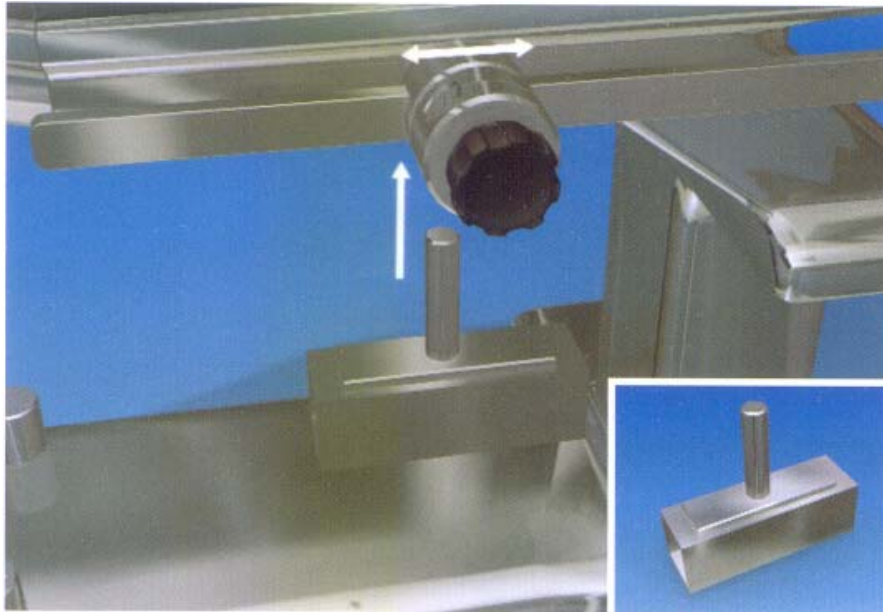


2. Montar o dispositivo PORD™ da seguinte forma: Deslizar a Barra Horizontal através da Caixa de Suporte Angulado com sua porção curvada virada para a mesa de fratura.

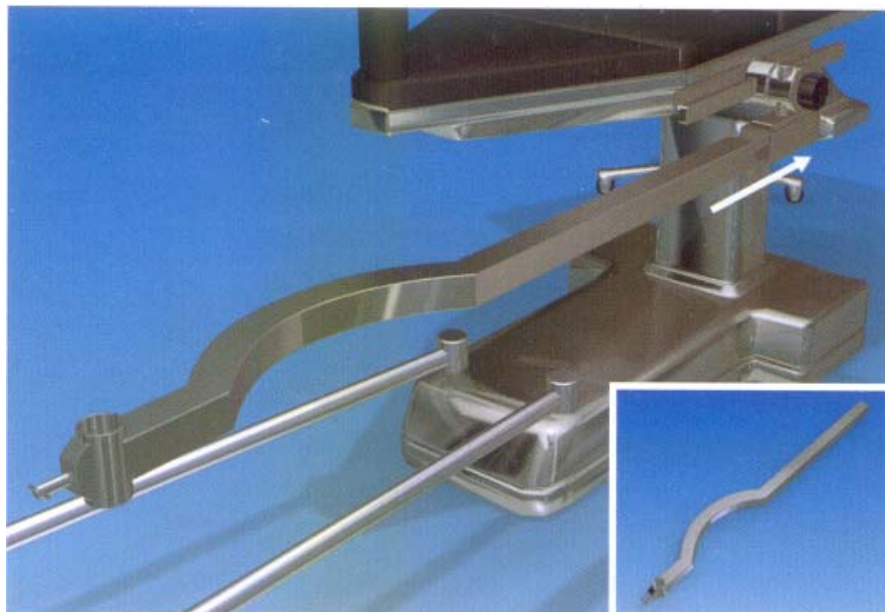


3. O Parafuso de aperto do Suporte de Membro deve ser assentado completamente dentro do Corpo da Barra Horizontal com a Porca girada de tal forma que ela encaixe justamente abaixo da Borda Radiolucente.

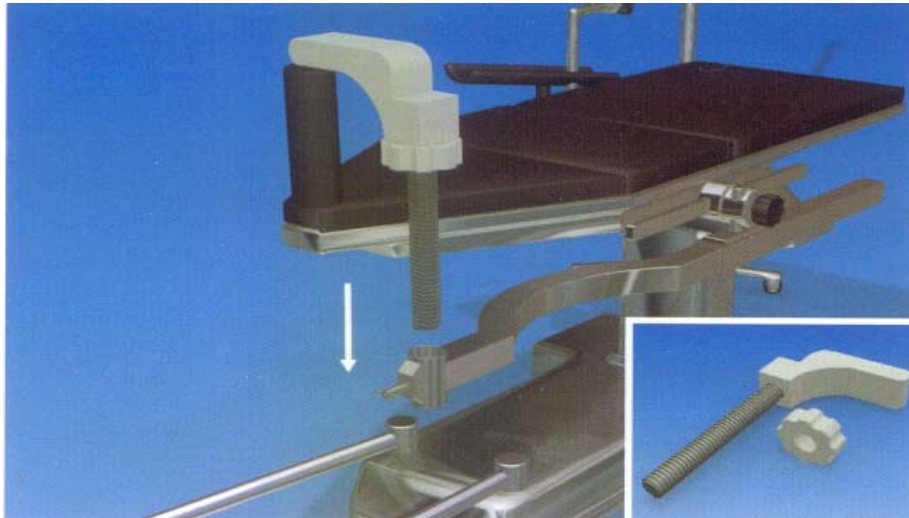

4. O Suporte de Membro é posicionado abaixo da parte da fratura que requer elevação. A posição correta do suporte é confirmada no exame AP (a sombra do suporte pode ser vista). Girar a Porca no sentido horário para levantar o Suporte de Membro, assim elevando e alinhando a fratura. Notar que para obter a redução, o Suporte de Membro necessita ser posicionado abaixo do fragmento proximal, do fragmento distal ou do próprio espaço da fratura. A redução correta deve ser confirmada com um exame lateral no Intensificador de Imagem. Para abaixar o Suporte de Membro girar a Porca no sentido anti-horário.

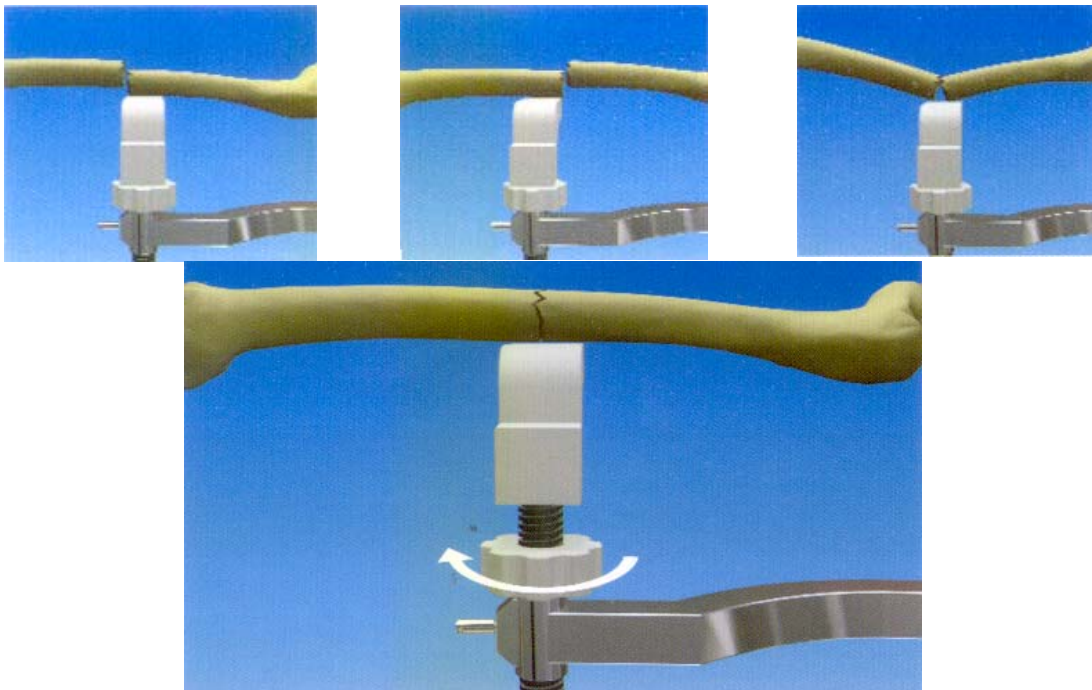

5. Quando a fratura estiver corretamente alinhada, apertar o Parafuso de Ponta na Barra Horizontal para segurar a posição do Suporte de Membro. Existe a tendência do Suporte de Membro girar quando sua posição está sendo ajustada, devido a seção cônica cruzada da coxa. Ele deve portanto ser seguro firmemente durante este procedimento, e enquanto estiver apertando o Parafuso de Ponta. O paciente pode ser agora preparado e coberto para a cirurgia. O dispositivo PORD pode também ser coberto durante a cirurgia, e não requer portanto esterilização.

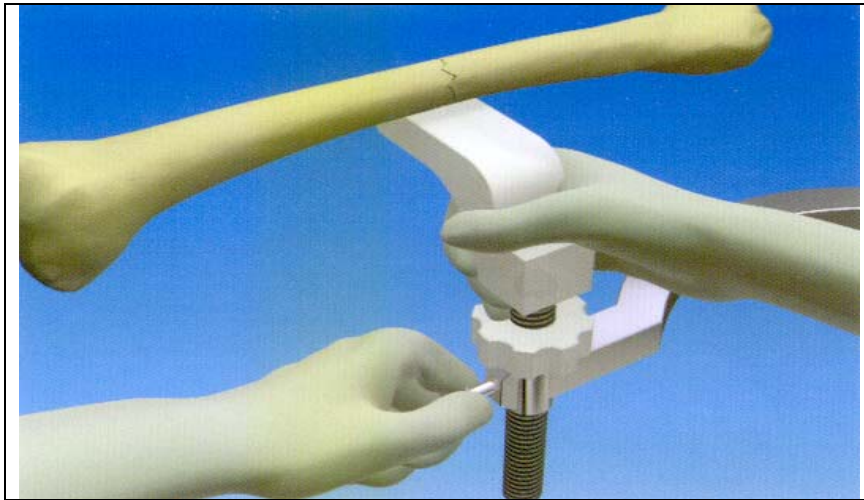

Limpeza

Após o uso, o dispositivo PORD deve ser lavado completamente numa solução de sabão suave . Secar completamente. Pode ser necessário usar secador de ar para secar a parte externa do corpo do parafuso .

Garantia

A ORTHOFIX Brasil Ltda, como representante da ORTHOFIX Inc. - USA, no Brasil, assume responsabilidade direta perante o cliente garantindo os produtos conforme os termos abaixo descritos.

A ORTHOFIX garante ao comprador original que o equipamento não apresenta nenhuma falha de material ou de processo até instalação, desde que instalados pelos técnicos da ORTHOFIX.

O PORD™ Dispositivo de Redução Posterior tem garantia por um período de UM ANO a partir da data da instalação.

A obrigação da ORTHOFIX segundo os termos desta garantia, é expressamente limitada ao fornecimento de peças de reposição e / ou atendimento, ou substituição, a seu critério, de qualquer parte que, a critério exclusivo da ORTHOFIX, for considerado defeituoso.

Qualquer uso inadequado ou negligente, quaisquer alterações ou reparos que não estejam de acordo com o manual do produto, ou sejam realizados por outros de tal maneira que, no julgamento exclusivo da ORTHOFIX, afete o produto de forma substancial ou negativa, invalidará esta garantia.

Para se obter Peças e Serviços

Para atendimento dentro do Brasil, utilizar o seguinte endereço, em horário comercial:

ORTHOFIX Brasil Ltda.
Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP: 05410-002
Fone / Fax: (11) 3087-2266

Registro ANVISA nº 10392060041
Responsável Técnico: Marco Antonio da Costa Bingre
CRF- 8 SP nº 7540

Armazenar e Transportar entre -10° e 70°C e umidade entre 5 e 95%.

Transporte: Transportar com cuidado evitando batidas e quedas de forma que não provoque danos ao produto.

Observar sempre a integridade da embalagem e as condições de armazenagem.

Fabricado por:

ORTHOFIX S. r. l..

Via delle Nazioni, 9

37012 Bussolengo - VR

Itália

Importado e Distribuído por:

ORTHOFIX Brasil Ltda.

Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros

São Paulo - SP - CEP: 05410-002

CNPJ: 02 690.906 / 0001-00

Registro ANVISA: 10392060041

Responsável Técnico: Vanessa Moraes Esteves – CREA-SP: 5063016170

Informações ao Consumidor: Fone: (011) 3087-2266